

REQUISIÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO OCULAR

Orientações para submissão em: cvap.com.br

Data: / /

Nome do animal: Espécie: canino felino equino outra

Raça: Idade: anos meses desconhecida

Sexo: fêmea castrada fêmea não castrada macho castrado macho não castrado desconhecido

Nome do proprietário:

Médico Veterinário:

Nome da clínica / hospital / instituição:

Endereço:

e-mail: Telefone:

Material: bulbo ocular córnea pálpebra 3ª pálpebra evisceração outro


Olho: olho direito (OD) olho esquerdo (OS) ambos os olhos (OU) desconhecido

Data da cirurgia: / / Exame HPT prévio? sim não

Qual o diagnóstico?

.....

Descreva a história clínica e os achados oftálmicos:

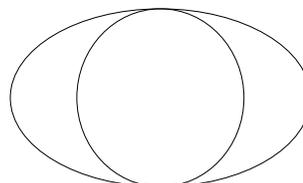

Glaucoma: sim não Tempo de evolução: desconhecido Cor da íris:

Condição clínica geral e resultados de exames complementares:

O paciente veio a óbito? sim não Se sim, qual a causa mortis e moléstias principais?

.....

Dicas para envio de bulbo ocular e anexos oculares

- 1) Remova todos os tecidos que não são o foco de interesse no material que será enviado antes da fixação, a não ser que você esteja mandando tecidos para que avaliemos as margens cirúrgicas (órbita ou outros). Você pode indicar lesões importantes ou orientar a amostra colocando suturas no material que será enviado. Alternativamente, desenhos e descrições das lesões na requisição (p. ex. neoformação ou úlcera de córnea) são extremamente valiosos para nós. As fotos dos casos clínicos são bem-vindas contanto que sejam enviadas com a história clínica escrita na requisição.
- 2) Por favor não incise o bulbo ocular e não há necessidade de injetar formol.
- 3) Coloque a amostra em formol a 10% o mais rápido possível. O volume de fixador deve ser no mínimo 10 vezes maior que o volume do material pelo menos nas primeiras 24 horas. Após esse período a amostra pode ser enviada com uma quantidade menor de formol, caso deseje.
- 4) Coloque a amostra em um recipiente hermeticamente fechado e IDENTIFICADO e após isso coloque o recipiente dentro de um saco coletor (caso necessário solicite junto ao CVAP). O recipiente deve ter a “boca larga” para que o material possa ser removido do mesmo após estar fixado. Amostras extremamente pequenas devem ser colocadas dentro de cassetes antes de serem colocadas dentro do recipiente. Por favor, coloque a requisição fora do saco coletor que abriga o recipiente para protegê-la de vazamento. O esparadrapo pode ser utilizado para vedar o recipiente evitando vazamentos.
- 5) Coloque a embalagem plástica contendo o recipiente e a requisição dentro de uma caixa resistente com toalha de papel no fundo. Envie para o endereço indicado na requisição.
- 6) Em caso de dúvidas entrar em contato.

Apenas para uso do CVAP

Corte: DV Horiz Obl

Bulbo ocular:

Dissecado:

Anexos:

Córnea:

Úvea:

Lente:

Vítreo:

Retina:

Nervo óptico:

Tecido remanescente: